


Ivoclean

イボクリーン | 修復物内面クリーニング液

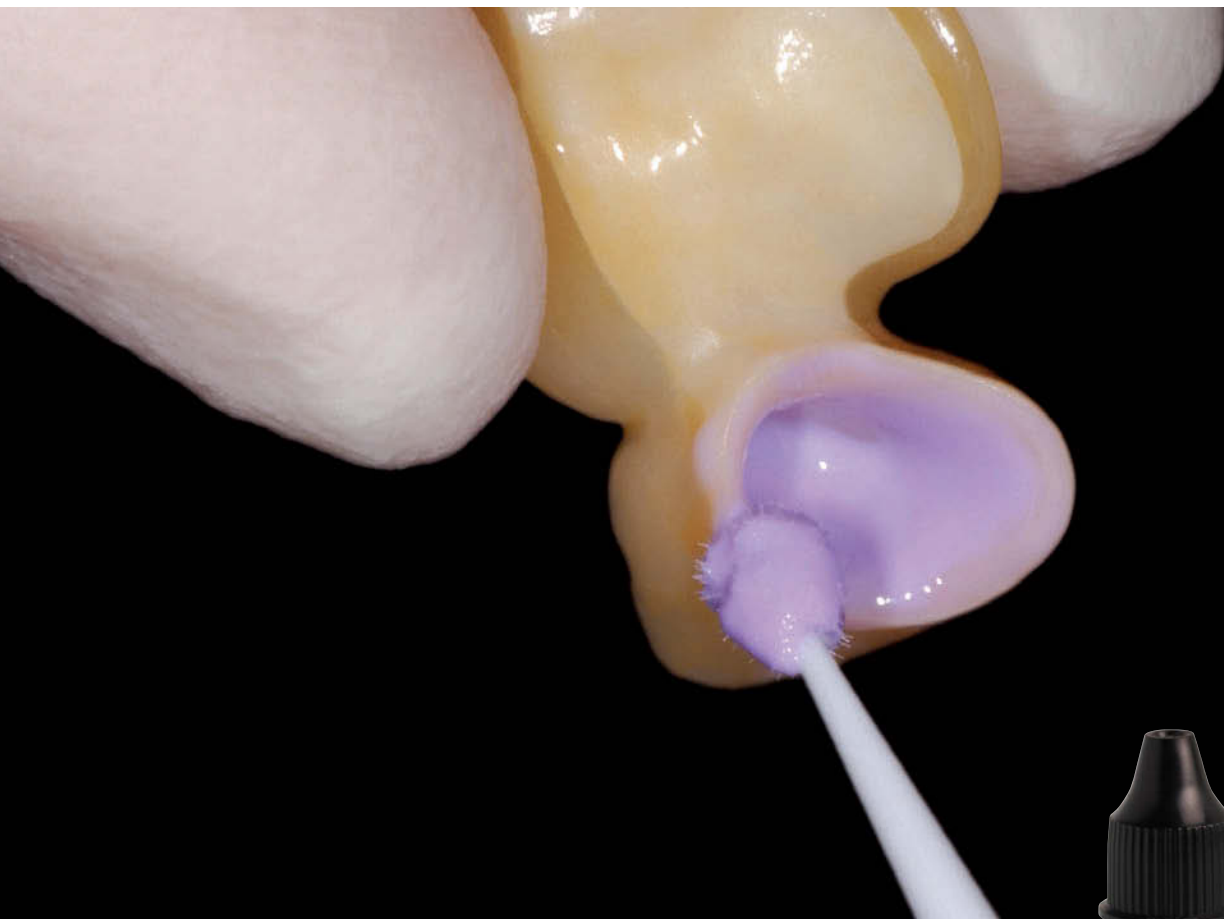

試適後のクリーニングを変える、ヨーロッパからの新しいスタイル


Ivoclean

修復物内面クリーニング液 | イボクリーン



試適後の清掃には、リン酸エッチング材?!

唾液による補綴物の汚染は、接着力の低下を招きます。しかし、試適の際、唾液による汚染は必ず起こります。通常、このクリーニングにはリン酸エッチング材が使用されますが、これは万能ではありません。特に、酸化ジルコニウムや卑金属でリン酸エッチング材を使用したクリーニングをすると、接着に必要な化学反応が先に起こり、逆に接着力の低下を招いてしまいます。これを解決するのが、新登場のクリーニング液、イボクリーンです。接着前に使用することで、安定した接着を得ることができます。

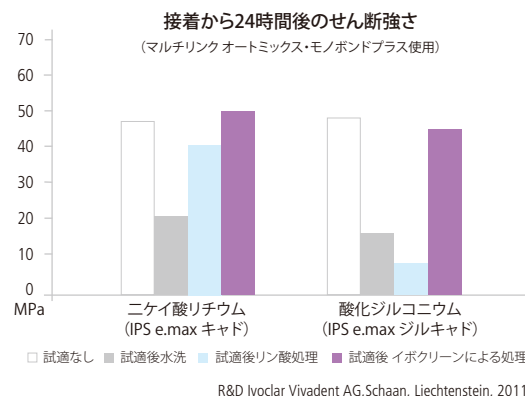

EFFECTIVE 効果的に。

イボクリーンは唾液による修復物接着面の汚染を効果的にクリーニングし、修復物とレジンセメントの強固で持続的な接着ができます。

SIMPLE 簡単に。

接着面にイボクリーンを塗布し、20秒間待ちます。その後水洗し、エアーで乾燥させるだけの簡単操作です。



補綴物の試適



水洗し、乾燥する。



イボクリーンを塗布し、20秒間待つ。



水洗し、乾燥する。

UNIVERSAL あらゆる補綴物に。

イボクリーンは様々な歯科材料に使用できます。

- ガラスセラミックス
- 酸化ジルコニウム
- 貴金属
- 間接修復用コンポジット
- 酸化アルミニウム
- 卑金属

製品内容

637568AN

イボクリーン 5g × 1本



— 関連製品 —

UNIVERSAL Luting Composites Multilink® Automix

デュアルキュア型 接着性レジンセメント

簡便なオートミックスタイプで、様々なケースに適応します。余剰セメントの除去も容易で、強固な接着を可能にします。



一般的名称：歯科接着用レジンセメント
販売名：マルチリンク / 認証番号：221 AGBZX00186000 / 管理医療機器

UNIVERSAL Only One Primer Monobond Plus

オンリー1プライマー

シラン処理やメタルや酸化ジルコニウムの前処理も、これ1本・1分間で処理できる、シンプルを極めたプライマーです。



一般的名称：歯科セラミックス用接着材料
販売名：モノボンドプラス / 認証番号：223 AGBZX00093000 / 管理医療機器

製造販売元

Ivoclar Vivadent 株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷 1-28-24
TEL: 03-6903-3537 FAX: 03-5844-3657
www.ivoclarvivadent.jp
info.japan@ivoclarvivadent.com

PRZ003B01

ivoclar
vivadent®
passion vision innovation