

Telio[®] CS

For Dentist

テリオ CS –チェアサイド用プロビジョナルシステム



テンポラリーの、その先に。




Telio[®] CS

チェアサイド用 プロビジョナルシステム テリオ CS

テンポラリーの、その先に。

インプラント治療や審美修復が求められる今、
 テンポラリー修復物もその重要性を増し、
 耐久性や審美性を要するものへと変化しています。
 プロビジョナル レストレーションと呼ばれるそれらは、
 治療計画において、最終補綴物の機能性や
 審美性を決める、重要な役割を果たします。
 Ivoclar Vivadent は、その要求に応えるため、
 テンポラリーという土壌に、「Telio」という種をまきました。
 それは、最終補綴物という
 美しい花を咲かせるための、ひとつの答えです。

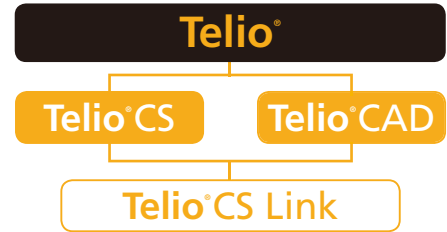

高い耐久性

高い曲げ強度と曲げ弾性率で耐久性の高いプロビジョナルの製作が可能です。単冠から多数歯ブリッジまで適応しています。

テクニカルデータ

曲げ強度	90MPa
曲げ弾性率	3,000MPa

ISO10477 による / Ivoclar Vivadent R&D 2009

優しく

重合時の温度変化が少なく、歯髄や軟組織へのダメージが少ないだけでなく、重合収縮も少ないため、多数歯欠損でも歯牙へストレスで装着できます。

重合収縮率	4.2%
重合時温度変化	+ 1.4℃
吸水率	0.6%

Step

印象に注入



バーチャルパテ等で製作したコアに、テリオ CS C&Bが均一に混ざっているのを確認後、直接注入する。

口腔内に装着



口腔内で1~2分間維持する。

硬化



3分間で硬化(化学重合)。

仕上げ



カーバイドバーやオプトラポル等を使用して調整、研磨します。

Temporary restorations out of one hand



Telio[®]CS C&B

テリオCS C&Bは、簡便性を重視してつくられた、プロビジョナル用化学重合型のコンポジットレジンです。オートミックスのため、少ない労力でクオリティーの高いプロビジョナルの製作が可能です。高い機械的強度と天然歯のような審美性を持ち、インプラントのような強い咬合力のかかる修復でも、審美性の求められるオールセラミックス修復にも、柔軟に対応できます。



簡単操作

オートミックスで簡単に操作できるだけでなく、操作毎にミキシングチップを交換するので衛生的です。また、気泡混入を防ぐことができ、均一の物性をプロビジョナルに与えることができます。



プロビにふさわしい、審美性

5つのシェードから選択でき、患者さんのニーズにあわせた自然で審美性の高い修復物が製作できます。



Repair & Reline

テリオ CS C&Bは、破折部の修理やリラインの他、テリオ CADの修理・リラインにも使用できます。

前処理



パーで新鮮面を出し、表面を荒らします。

ボンディング



ボンディング材を塗布します。

テリオ CS C&B



テリオ CS C&Bを塗布します。

仕上げ



カーバイドバーやオプトラポル等を使用して調整、研磨します。



Telio® CS Link

テリオ CS リンク

審美性を重視したデュアルキュア型仮着用レジンセメントです。ユージノールフリーなので、最終補綴物の接着で使用している接着性レジンにも影響を及ぼしません。長期間装着する修復物の仮着にも対応できます。



テリオ CS リンク 各6g×2

627912AN A3 627914AN トランスペアレント

※ ミキシングチップ×10本が付属しています。



オートミックスで修復物に直接塗布。



口腔内に装着し、多方向から2～4秒光照射。



余剰セメントの除去。



再度、多方向から10秒光照射。化学重合の硬化時間：2.5～3分

製品内容

テリオ CS C&B 各 78g × 1

628249AN	BL3	628245AN	A1
628246AN	A2	628247AN	A3
628248AN	A3.5		

ミキシングチップ(ブルー) 10本付属



テリオ CAD CEREC/inLab LT 各 3 個入

	B40L	B55
LT BL3	627718AN	627824AN
LT A1	627719AN	627825AN
LT A2	627720AN	627826AN
LT A3	627721AN	627827AN
LT A3.5	627722AN	627828AN
LT B1	627723AN	627829AN



※ 別途パンフレットをご用意しています。

交換用チップ
ミキシングチップ(ブルー)

628157 50本



テリオ CS C&B 用 ガン
カートリッジ ディスペンサー 10:1

561381AN × 1



関連製品

小さな修理では、光重合型フロアブルコンポジットレジン、テトリック N-フローを使用できます。その場合、充填前にトータルエッチタイプのボンディング材を使用してください。



一般的名称：歯科用高分子製暫間クラウン及びブリッジ
販売名：テリオ CS
認証番号：222AGBZX00259000
管理医療機器

一般的名称：歯科用高分子製暫間クラウン及びブリッジ
販売名：テリオ CAD
認証番号：222AGBZX00028000
管理医療機器

一般的名称：歯科用注入器具
販売名：カートリッジディスペンサー
届出番号：13B1X10049IV0028
一般医療機器

一般的名称：歯科充填用コンポジットレジン
販売名：テトリック N-フロー
認証番号：220AKBZX00027000
管理医療機器

製造販売元

Ivoclar Vivadent 株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷 1-28-24
TEL: 03-6903-3537 FAX: 03-5844-3657
www.ivoclarvivadent.jp
info.japan@ivoclarvivadent.com

PR0020B01