


Ivoclean

Proper cleaning after try-in

修復物内面クリーニング液 イボクリーン

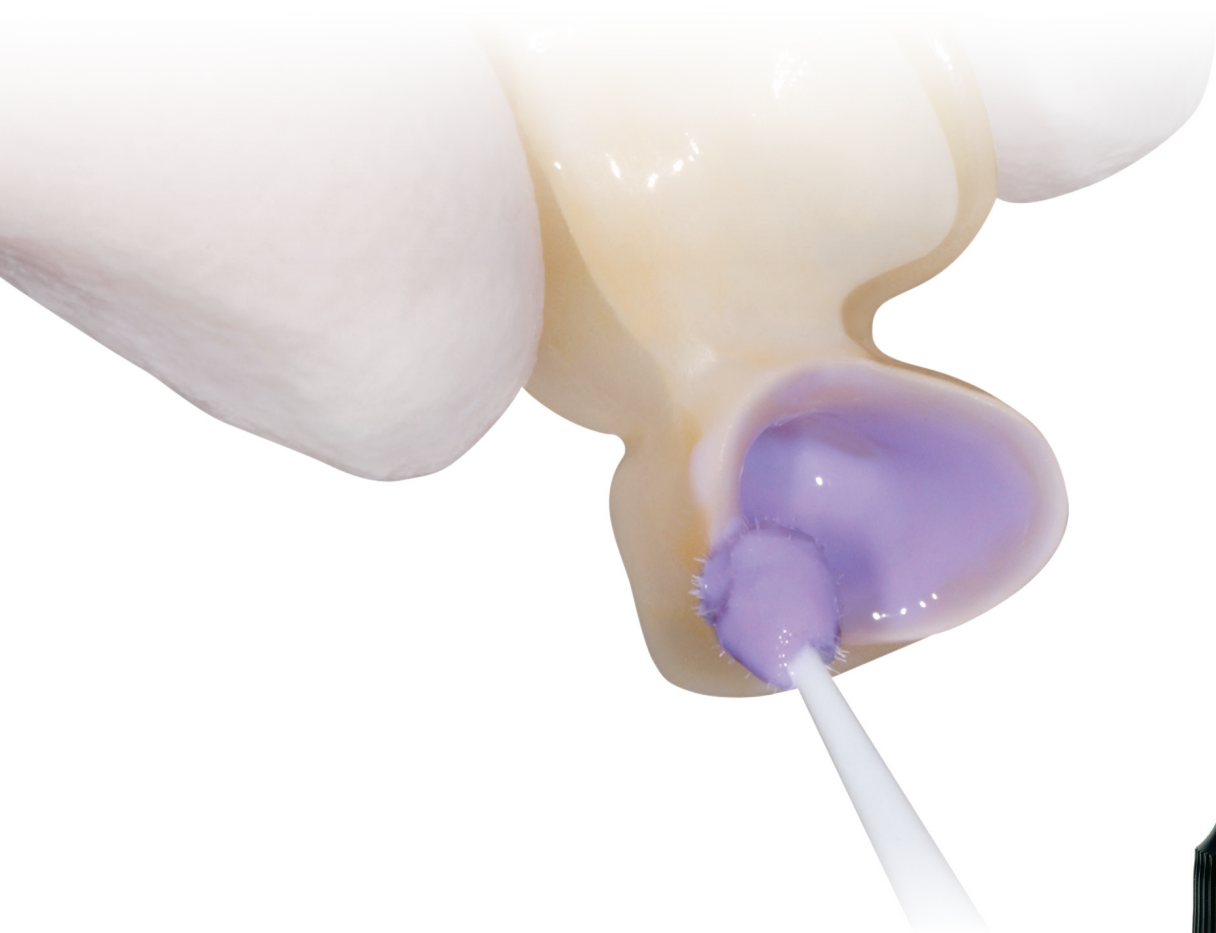

試適後の効果的な、
クリーニングスタイル



Ivoclean

Proper cleaning after try-in

修復物内面クリーニング液 イボクリーン

試適後の酸化ジルコニウム、どのように清掃していますか？

唾液や血液による修復物内面の汚染は、接着力の低下を招きます。


しかし、試適の際、唾液による汚染は必ず起こります。

特に、酸化ジルコニウムや卑金属合金をリン酸エッチング材で洗浄すると、接着に必要な化学反応が先に起こり、逆に接着力の低下を招いてしまうと言われています。

これを解決するのが、修復物内面のクリーニング液、イボクリーンです。

EFFECTIVE 効果的に。

イボクリーンは接着力に影響する修復物試適後の唾液や血液由来のリンタンパク汚染をクリーニングします。

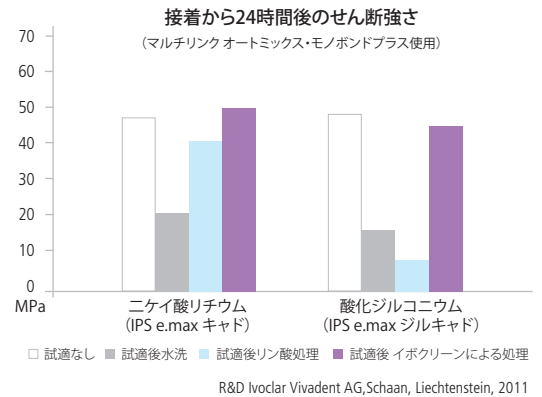

UNIVERSAL あらゆる修復物に。

イボクリーンは様々な歯科材料に使用できます。

- ・ガラスセラミックス
- ・酸化ジルコニウム
- ・貴金属合金
- ・間接修復用コンポジット
- ・酸化アルミニウム
- ・卑金属合金

製品内容

イボクリーン

637568AN 5g × 1



SIMPLE 簡単に。

修復物の接着面にイボクリーンを塗布し、20秒間待ちます。その後水洗し、エアーで乾燥するだけの簡単操作です。



修復物の試適



水洗し、乾燥する。



イボクリーンを塗布し、20秒間待つ。



水洗し、乾燥する。

関連製品

Fixed Prosthetics

SpeedCEM® Plus

セルフアドヒーシブ接着性レジンセメント
スピードセム Plus

酸化ジルコニウムやインプラント上部構造に優れた化学重合力で、光を通しにくい材料でも安定した接着を得られます。



酸化ジルコニウムの
接着に、大きな
プラス

システムキット トランスペアレント

681714WW 1セット

シリジトランスペアレント 9g × 1、
イボクリーン 5g × 1、
ミキシングチップ ブラック 15本

クリーニング材イボクリーン入りです。



一般的名称：歯科接着用レジンセメント / 販売名：スピードセム / 認証番号：221AGBZ00208000 / 管理医療機器

製造販売元

Ivoclar Vivadent 株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷1-28-24

TEL: 03-6801-1301 FAX: 03-5844-3657

www.ivoclarvivadent.jp

info.japan@ivoclarvivadent.com

PRZ003B11

ivoclar
vivadent®
passion vision innovation