


for Variolink II

# Excite® F DSC Dual cure Single Component

エキサイト F DSC デュアルキュア 1 液性ボンディング材

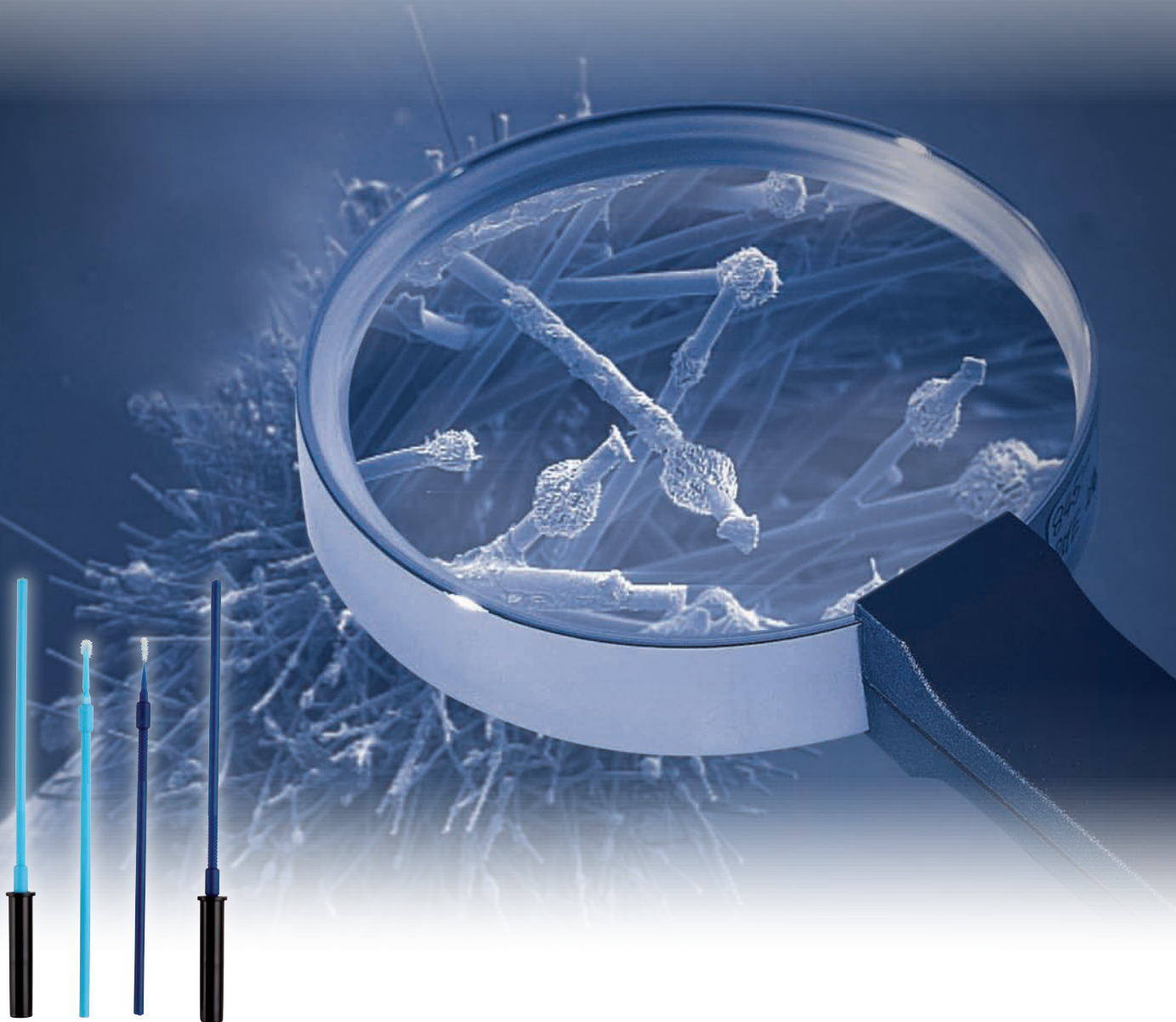

ivoclar  
vivadent®  
passion vision innovation

# Excite® F DSC Dual cure Single Component

エキサイト F DSC デュアルキュア 1 液性ボンディング材

エキサイト F DSCは、エッチングを併用する、デュアルキュアタイプのボンディング材です。


## Dual cure DSC — デュアルキュア型

マイクロブラシ先端に付着した重合開始材を容器中で優しく混和し、デュアルキュアまたは化学重合型のセメントやコンポジットレジンと使用することで、化学重合が開始するシステムです。光の届きにくい根管内や最後臼歯でも使用できます。



## Strong bond to Enamel & Dentin 高い接着強度


良質なナノフィラーからなるエキサイト F DSC は、1 回の塗布でエナメル質、象牙質ともに安定した高い接着強度が得られます。

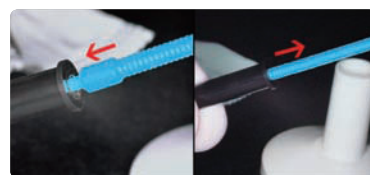

ブラシを容器内に軽く押し込み、優しく数回上下して混和し、塗布します。

## Fluoride Release フッ素徐放性

フッ素を含有しており、治療後数日間フッ素を徐放します。

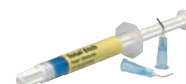

## 特長

- 1 本で修復物 4 歯分の接着ができます。
- 1 回使い切りなので、いつも新鮮で衛生的です。
- 1 回でボンディングが完了するため、治療時間を短縮できます。
- 多用途なレギュラータイプと、根管用に便利なエンドタイプをご用意しています。
- 接着性レジンセメント バリオリンク II との使用に特に適しています。

## 簡単ステップ

- ① リン酸エッチング(例:トータルエッチ)
- ② エキサイト F DSCを 1 層塗布  
(最短 10 秒スクラブ)
- ③ エアー乾燥
- ④ 光照射 (500mW/cm<sup>2</sup>: 10 秒)

## 製品内容



### エキサイト F DSC シングルドース

634669AN レギュラー 0.1g × 20



### エキサイト F DSC シングルドース

634668AN エンド 0.1g × 20



レギュラー エンド



※マイクロブラシに重合開始材が付着しているため、通常のアプリケーターでは使用できません。

一般的名称：歯科用象牙質接着材 / 販売名：エキサイト F DSC / 認証番号：222AGBZX00166000 / 管理医療機器

製造販売元

Ivoclar Vivadent 株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷1-28-24

TEL: 03-6801-1301 FAX: 03-5844-3657

www.ivoclarvivadent.jp

info.japan@ivoclarvivadent.com

PR0224B02

ivoclar  
vivadent®  
passion vision innovation