

IPS e.max[®]

500 MPa



高強度、高審美性

高い強度と審美性により世界中の臨床家に選ばれているIPS e.max ニケイ酸リチウム。10年間、継続されてきた品質試験で、二軸曲げ強度 平均500MPa*であることが証明されました。接着を行うことで、咬合面の切削量1mmのクラウンが製作可能です。

IPS e.maxが選ばれ続ける理由

- 咬合面、最小形成量1mm
- 幅広い透過性
- 500MPa



世界中で選ばれ続ける**オールセラミックス、IPS e.max ニケイ酸リチウムあらゆるニーズにお応えします。

*Source: R&D Ivoclar Vivadent AG, Schaan, Liechtenstein
**売上高に基づく

IPS e.max[®]
is now even more versatile!

www.ivoclarvivadent.jp

Ivoclar Vivadent 株式会社 〒113-0033 東京都文京区本郷 1-28-24 | TEL 03-6801-1301 | FAX 03-5844-3657

ivoclar
vivadent[®]
passion vision innovation

ニケイ酸リチウム ガラスセラミックスの最小形成量 (クラウン)

NEW 臨床研究の結果、少なくとも1mmの厚みがあり、接着性レジンセメントを使用すれば、IPS e.max ニケイ酸リチウムは、500MPa*の強度があることが証明されました。

*二軸曲げ強度の平均結果 (IPS e.max キャド **530 MPa**, IPS e.max プレス **470 MPa**) (R&D Ivoclar Vivadent AG, Schaan, Liechtenstein)




適応:

前歯、臼歯クラウン

- 一 従来型セメント、セルフアドヒーシブタイプを使用した場合にはあてはまりません。
- 一 厚み1mm以下、鋭縁や解剖学的な形態の欠如、不規則な形成、コンポジット(テトリック N-セラム パルクフィル 等) 以外を使用してビルドアップした場合にもあてはまりません。
- 一 また、ブラキシズムや犬歯ガイドが欠如した症例、ブリッジやインプラント上部構造に使用する場合を除きます。

形成ガイド:

接着性レジンセメントを使用した場合
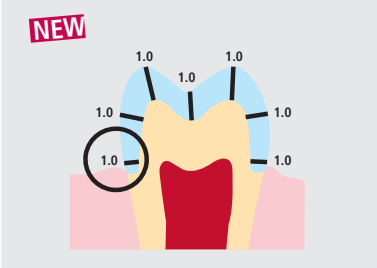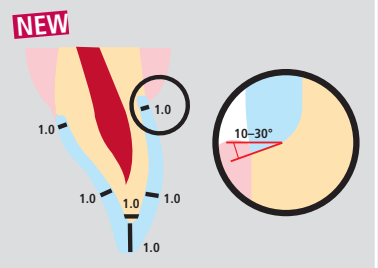
| 臼歯部クラウン | 前歯部クラウン | 支台歯のビルドアップ |
|--|--|---|
|  <p>NEW</p> |  <p>NEW</p> |  <p>テトリック N-セラム パルクフィル</p> |
| <p>解剖学的形態を考慮し規定された最小の厚みを守り、形成します。マージンは、内縁に丸みを持たせたショルダーあるいはシャンファーにし、少なくとも1mmの厚みを持たせず。また、切縁、軸面、咬合面は、少なくとも1mmの厚みで解剖学的形態を考慮し形成します。</p> | | <p>4mmまで重ねるコンポジットレジン。光が届きにくいビルドアップにもご使用ください。</p> |

接着性レジンセメント

歯質の処理
Adhese® Universal


セメント
Variolink® Esthetic

修復物の処理
Monobond Etch & Prime®

O. Brix, Germany




IPS e.max プレス

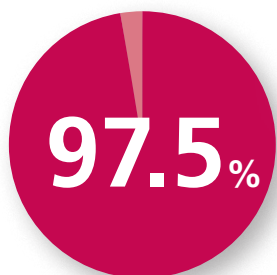

外部6臨床研究
メンテナンス期間: **10年間**
合計: 642症例



IPS e.max キャド

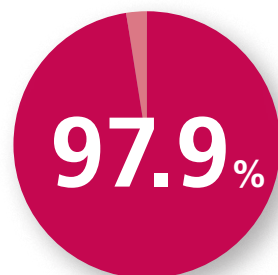

外部6臨床研究
メンテナンス期間: **4年間**
合計: 237症例



一般の名称: 歯科加工成形用セラミックス / 販売名: IPS e.max プレス / 認証番号: 220AGBZX00010000 / 管理医療機器
 一般の名称: 歯科切削加工用セラミックス / 販売名: IPS e.max キャド / 認証番号: 220AGBZX00008000 / 管理医療機器
 一般の名称: 歯科充填用コンポジットレジン / 販売名: テトリック N-セラム / パルクフィル / 認証番号: 225AGBZX00011000 / 管理医療機器
 一般の名称: 歯科用象牙質接着材 / 販売名: アドヒーズ ユニバーサル / 認証番号: 226AGBZX00069000 / 管理医療機器
 一般の名称: 歯科接着用レジンセメント / 販売名: バリオリンク エステティック / 認証番号: 227AGBZX00001000 / 管理医療機器
 一般の名称: 歯科セラミックス用接着材料 / 販売名: モノボンド エッチ & プライム / 認証番号: 227AGBZX00018000 / 管理医療機器

製造販売元

Ivoclar Vivadent 株式会社
〒113-0033 東京都文京区本郷1-28-24
TEL:03-6801-1301 FAX:03-5844-3657
www.ivoclarvivadent.jp
info.japan@ivoclarvivadent.com

PR0004U03