

OptraGate® Easy Handling

オプトラゲート

着脱ガイド



動画でもご覧
いただけます。

装着・取り外し



1 太いリング（内リング）と細いリング（外リング）を軽く引っ張り、広げます。



2 外リング側から内リングをつまみます。



3 内リングの左右に口角にかかる部分ができるので、片方ずつ挿入します。




4 ミラー等を使用して、口腔前庭の深部まで押し込み、セットします。



6 ペーパータオル等で受けながら、上顎から下顎の順で口腔内の内リングを緩め、取り外します。

サイズ / 製品選択ガイド

パッケージに記載されたスケールで、口唇のカーブに沿って口角間の距離を確認し、適切なサイズを選択できます。

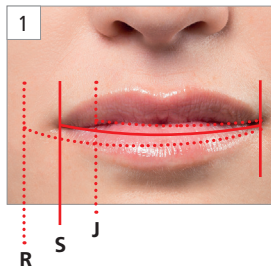

オプトラゲート機能を持つ
ラバーダムもあります♪

OptraDam オプトラダム



クランプなしで前歯の装着



オプトラダム リーフレット

口角間距離(目安)	4.5cm	6cm	7cm
色 / サイズ	J ジュニア	S スモール	R レギュラー
ブルー	669089WW カラーアソートメント ジュニア	669088WW カラーアソートメント スモール	
ピンク	ブルー / ピンク 各 20 枚	ブルー / ピンク 各 20 枚	
ホワイト	591451WW ジュニア ホワイト 80 枚	590851WW スモール ホワイト 80 枚	590850WW レギュラー ホワイト 80 枚
		577275WW アソートメント ホワイト レギュラー・スモール 各 40 枚	

一般的名称：歯科用開口器 / 販売名：オプトラゲート / 届出番号：13B1X10049IV0001 / 一般医療機器