

Temperature calibration

温度校正 キャリブレーション



ATK2

準備するもの

一製品番号 598833 : オートマチック TEMP チェックセット 2 (ATK2)

キャリブレーションの際には、必ず以下のステップを行ってください。

ATK2は、403℃以下になってから挿入してください。(※403℃以下にならないとキャリブレーションプログラムが作動しません。)

1. 温度キャリブレーションを開き、開始する。


「温度キャリブレーション (Temperature calibration)」を選択します。

ディスプレイに前回のキャリブレーションの日付が表示されますので、START キーを押してください。

2. 焼成テーブルを移動し、ATK2を差し込みます。

中央の穴に ATK2 上部を破損しないよう注意しながら差し込みます。ATK2の向きはどちらでもキャリブレーションする事が可能です。

キャリブレーションを行う前に ATK2を2~3回抜き差し、ATK2の柄の上部にあるラインまで押し込みます。入りづらいときは、何度か抜いて再度行ってください。

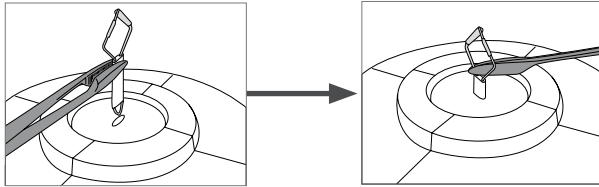

3. キャリブレーションを開始する。

START キーを押して開始します。

4. 完了したら、ATK2を抜き取ります。

プログラムが終了するとヘッドが開きます。ATK2を取り出しホーム画面に戻ります。

抜く時も力を入れすぎると本体上側の内部を破損する可能性があるため慎重に行ってください。



ー エラーメッセージ (1310) が画面に表示されましたら速やかにキャリブレーションを行うことをお勧めします。

ー キャリブレーションの途中でエラーが出た場合には、挿入された ATK2は再度で使用できません。

ー 詳しくは取扱説明書をご確認ください。

ー キャリブレーションが正常に行えなかった場合は、Ivoclar Vivadent カスタマーサービスにお問い合わせください。

製造販売元

Ivoclar Vivadent 株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷1-28-24

TEL: 03-6801-1301 FAX: 03-5844-3657

www.ivoclarvivadent.jp

info.japan@ivoclarvivadent.com

PRE002L03

ivoclar
vivadent[®]
technical