

## ブルーフェーズバッテリー充電方法のご案内

バッテリー充電ができない場合は、本手順を用いてご確認をお願い致します。  
お手数ではございますが、最初にバッテリー単体をチャージングベースに装着し  
て充電をお願い致します。バッテリーが完全に放電した際も、同様にバッテリー  
単体での充電をお願い致します。バッテリーに一定以上の残量がある場合は、  
ハンドピースにバッテリーを装着した状態で充電できます。

### 充電方法の写真

ブルーフェーズ Style/Style 20i

ブルーフェーズ 20i/G2



Ivoclar Vivadent 株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷1-28-24 TEL 03-6801-1301 FAX 03-5844-3657

[www.ivoclarvivadent.jp](http://www.ivoclarvivadent.jp)

[info.japan@ivoclarvivadent.com](mailto:info.japan@ivoclarvivadent.com)

PRE018Y1

  
ivoclar  
vivadent®