




1,100mW/cm² ± 10%

材料の重合バランスと重合パフォーマンスを考え、1,100mW/cm²の出力を採用しました。重合収縮と重合した材料の口腔内での物性、照射時間など、様々な条件を考慮し、臨床で求められるシンプルな操作を実現するために、選び抜いた数値です。

効率が良い、ストレートプローブ

直径10mmのライトプローブは、大きな窩洞も1度で照射できます。また、先端が短いプローブを採用しているため、最後臼歯の照射でも口を大きく開けてもらう必要がありません。

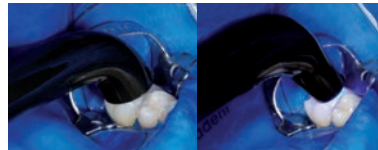

ブルーフェーズ style (Ø 10) 従来型の光照射器 (Ø 8)

連続使用可能

発熱を抑えたエネルギー効率が高いLEDを採用しており、ファンレスながら連続照射ができます。

過熱の際は自動停止するため、安心してお使い頂ける設計になっています。



人間工学に基づくデザイン

さらに小さく、さらに軽くなりました。低重量でコンパクトなデザインにより、男性の手にも女性の手にもなじみ、ストレスフリーの診療を実現します。



専用チャージングベース

チャージングベースにはインジケータがついているので、離れた場所からも充電状態を確認できます。また、無接点充電を採用しており、クリーニングがしやすくなっています。

バッテリーが切れても安心

最新型リチウムポリマーバッテリーを使用したコードレスタイプです。専用スタンドで簡単に充電できます。


また、連続使用や充電忘れ等により、万一バッテリーの充電が切れても、電源を直接本体に接続して使用できます。



ポリウェーブ LED



Ivoclar Vivadentのポリウェーブ(広波長域)LEDにより、ハロゲンのような385~515nmの広いスペクトルを持っています。どのような光重合開始材(ルシリンTPO・カンファーキノン)にも反応し、どのような光重合型材料も重合できます。

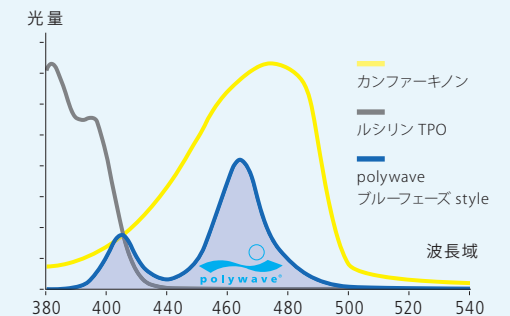

ブルーフェーズ ファミリー

ブルーフェーズは、Ivoclar Vivadentが2004年から製造しているチェアサイド用光照射器です。この照射器は、多方面で高い評価を頂き、多くの研究で使用されています。2010年のIADR (International Association for Dental Research, Barcelona) では、光照射器を使用した47研究のうち22の研究(47%)で使用されました。ブルーフェーズ style も、すでに5つのデザイン賞などを受賞しています。





Start button
スタートボタン

Time selection button
時間選択ボタン

ニーズに応える、シンプルな操作

1つのモードと、たった2つのボタンのみで構成されたブルーフェーズ style。Ivoclar Vivadentが独自に調査し、「さらに簡単で確実なもの」を求める先生方のニーズに応えた光照射器です。人間工学に基づいたデザインで、ガンのようにもペンのようにも保持でき、高い操作性を誇っています。



テクニカルデータ

ブルーフェーズ style		
波長	385 ~ 515 nm	
光量	1,100mW/cm ² ± 10%	
バッテリー	LiPo/バッテリー	
バッテリー使用可能時間	~ 20分 (完全充電2時間)	
ハンドピース	寸法	180 × 30 × 30 (mm)
	重量	120g
チャージングベース	寸法	125 × 125 × 70 (mm)
	重量	195g
保証	3年(バッテリー1年)	

Bluephase® Style on a ergonomic mission

ブルーフェーズ style 広波長域 LED 光照射器

ブルーフェーズ style スタンダードキット

635153BU × 1

ハンドピース、バッテリー、プローブ 10mm
アンチグレアコーン×3、スリーブ×50
チャージングベース、電源コード、ACアダプタ

ブルーフェーズ style ハンドピースキット*

637916 ハンドピース、バッテリー、プローブ 10mm

* お取寄せ品となります。

一般的名称：歯科重合用光照射器 / 販売名：ブルーフェーズ style / 届出番号：13B1X0049IVE019 / 一般医療機器 / 特定保守

ブルーフェーズ style ライトプローブ 10mm

636240 × 1 10mm 標準アクセサリ

ブルーフェーズ style ピンポイント ライトプローブ

636241 × 1 先端 2mm/ 筒 6mm

ブルーフェーズ style スリーブ

636239 50枚 プローブ先端までのカバー

ブルーフェーズ style バッテリー

637692 × 1 LiPo バッテリー

ブルーフェーズ style チャージングベース*

637938 × 1

アンチグレアコーン

551756 × 3 遮光用キャップ



ブルーフェーズ style ACアダプタ*

637939 × 1

ブルーフェーズ 電源コード*

920079 × 1

アンチグレアシールド

592496 × 1 遮光用シールド



製造販売元

Ivoclar Vivadent 株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷1-28-24

TEL:03-6801-1301 FAX:03-5844-3657

www.ivoclarvivadent.jp

info.japan@ivoclarvivadent.com

PRE019B02

ivoclar
vivadent®
passion vision innovation

シンプルは、スタイリッシュ。



Bluephase® Style The curing Light

ブルーフェーズ style 広波長域LED光照射器

ivoclar
vivadent®
passion vision innovation